



ERKAMETER 125

IHR ARZT VERTRAUT UNS ? SIE KÖNNEN ES AUCH

Seit nunmehr 125 Jahren sind Millionen Ärzte weltweit von der Akkuratess und Qualität unserer Blutdruckmessgeräte überzeugt. Dieses Vertrauen, basierend auf unserer langjährigen Erfahrung, haben wir in einem Gerät für die arztgenaue Blutdruckmessung zu Hause gebündelt. Absolute Präzision, neueste wissenschaftliche Messverfahren - validiert nach dem strengen Protokoll der European Society of Hypertension (ESH) aus dem Jahre 2010 - und vollendete Formen: das ist der Erkameter 125.

WIE WIRD DER BLUTDRUCK MEDIZINISCH KORREKT GEMESSEN?

Die European Society of Hypertension (ESH) beantwortet diese Frage in ihren Standards und der Erkameter 125 setzt diese konsequent um. Zwei automatische und ein manueller Messmodus zur Blutdruckmessung garantieren in jeder Situation des Alltags verlässliche und medizinisch relevante Messwerte für die professionelle Diagnostik.

WIE UNTERSTÜTZT DER ERKAMETER 125 MEINE THERAPIE?

Um die Aussagekraft und medizinische Relevanz einer häuslichen Blutdruckmessung zu maximieren, hat die European Society of Hypertension Empfehlungen zur Durchführung einer solchen Messung veröffentlicht. Der Messmodus MONITORING des Erkameter 125 setzt diese Anforderungen um. Eine so ermittelte Messwertreihe ist die notwendige Basis einer verlässlichen Ermittlung Ihres individuellen Risikos.

WARUM IST VORSORGE SO WICHTIG?

Vorsorge schützt! Hoher Blutdruck ist einfach und schmerzfrei festzustellen. Frühzeitig erkannt, können so dauerhafte Schädigungen lebenswichtiger Organe sowie lebensbedrohliche Folgeerkrankungen vermieden werden. Das handliche Design des Erkameter 125 ermöglicht das Blutdruckmessen in nahezu jeder Alltagssituation und an jedem Ort, und ermöglicht somit aussagefähige Analysen und Vergleiche Ihrer Messwerte.

WORIN LIEGT DER VORTEIL DER ABSOLUT EXAKTEN MESSGENAUIGKEIT DES ERKAMETER 125?

Ein systematischer Messfehler von ± 5 mmHg übersieht die Behandlungsbedürftigkeit bzw. führt zur ungerechtfertigten Behandlung von signifikanten Patientengruppen! Die Messgenauigkeit der ERKAMETER schafft Vertrauen in die Messwerte und somit in Diagnose und Therapie.

WIE GENAU IST DER ERKAMETER 125?

Validiert anhand der Standards der European Society of Hypertension von einem unabhängigen Prüflabor erzielt der Erkameter 125 deutliche Bestnoten im Vergleich zu allen anderen aktuell getesteten Blutdruckmessgeräten!

WARUM IST EINE EXAKTE, REPRODUZIERBARE BLUTDRUCKMESSUNG VON SIGNIFIKANTER BEDEUTUNG?

Verschiedene wissenschaftliche Studien belegen, dass schon ein Absenken des Blutdrucks um 5-6 mmHg ein relevanter Therapieerfolg ist, allerdings müssen die Unterschiede in dieser Dimension auch vom Messgerät verlässlich ermittelt werden können!

DIGITALES BLUTDRUCKPROTOKOLL

myERKA ist ein Tool zum gesundheitsbewußten Umgang mit dem Thema Bluthochdruck durch die regelmäßige Kontrolle und Analyse Ihrer Messwerte. Wir unterscheiden hierbei zwei Gruppen von Anwendern: den aktiv-präventiv seinen Blutdruck kontrollierenden Anwender sowie den therapiebegleitend überwachenden Hypertoniker. Basierend auf neusten wissenschaftlichen Erkenntnissen können wir durch die Einbeziehung verhaltensbedingter und medizinischer Risikofaktoren die Aussagekraft der gemessenen Blutdruckwerte signifikant erhöhen, und somit die Wirksamkeit präventiver oder medizinisch-therapeutischer Maßnahmen zum Wohle Ihrer Gesundheit verbessern. Regelmäßiges Blutdruckmessen ist ? egal ob proaktiv oder therapiebegleitend - elementarer Bestand eines verantwortungsvollen Umgangs mit dem Thema Bluthochdruck. Nehmen Sie sich die Zeit, mindestens einmal am Tag Ihren Blutdruck zu messen! Anschließend übersenden Sie die Messergebnisse in Ihr persönliches Blutdruckprotokoll unter myERKA. Dort können Sie die Werte vergleichen, analysieren, filtern und mit der Tagebuchfunktion um detaillierte Informationen zu den Begleitumständen der Messung ergänzen. Ein auf diese Art geführtes Blutdruckprotokoll ist für Sie und Ihren Arzt eine unschätzbare Hilfe im Rahmen der Erfolgsbeurteilung getroffener präventiver oder therapeutischer Maßnahmen.

TOUCH-DISPLAY

Die Bedienung erfolgt über ein innovatives, 2.8 " TFT full colour Touch-Display und unterstreicht die anwenderfreundliche Gerätekonzeption des Erkameter 125.

SPEICHER

Dem Anwender stehen - entsprechend den modi operandi RAPID, ANVANCED und MONITORING - drei Speicherbereiche mit jeweils 500 Speicherplätzen zur Verfügung. Intuitive Menüführung, vorbildliche Ablesbarkeit und eine übersichtliche Darstellung der Messwerte garantieren höchste Usability.

TECHNISCHE DETAILS

Spannungsversorgung: Batteriebetrieb
Abmessungen: 133 mm x 70 mm x 25 mm
Gewicht: ca. 180 Gr. Anzeigesystem: digitale Anzeige
Messmethode: oszillimetrisch
Zusätzliche kostenfreie XXL-Garantie: 3 Jahre

WIE KANN ICH DIE WIEDERVERWENDBAREN ERKA BLUTDRUCKMANSCHETTEN REINIGEN?

Unsere ERKA GREEN CUFF Blutdruckmanschetten verfügen über eine wasserdichte, abwischbare Oberfläche und sind einfach, schnell und gründlich zu reinigen.

WIE WIRD DIE MANSCHETTE DESINFIZIERT?

Alle ERKA Green Cuff Manschetten lassen sich einfach und zuverlässig durch Sprüh- bzw. Wischdesinfektion desinfizieren. Besprühen Sie den Manschettenbezug mit Desinfektionsmittel und lassen Sie es nach Herstellerangaben einwirken.

Alternativ desinfizieren Sie die Manschette mit einem mit Desinfektionsmittel beprühten Tuch und wischen anschließend mit leichtem Druck die Oberfläche ab.

WELCHE DESINFEKTIONSMITTEL EMPFIEHLT ERKA?

Fugaten® SprayEsemfix® von SchülkePromanum® pur von B.BraunMeliseptol® Foam pur von B.Braun

KANN ICH DEN GEMESSENEN WERT FEHLERFREI ABLESEN?

Verschiedene wissenschaftliche Studien haben gezeigt, dass Ablese- und Dokumentationsfehler die Qualität der Blutdruckmessung negativ beeinflussen. Deshalb haben wir die Skalen unserer Blutdruckmessgeräte optimal ablesbar gestaltet und bieten diese in verschiedenen Größen an. Darüber hinaus wurden Zeigergeometrie und Skalendesign perfekt aufeinander abgestimmt.

WARUM SIND MIT DEN ERKA BLUTDRUCKMESSGERÄTEN SO PRÄZISE MESSUNGEN MÖGLICH?

Die manuelle Blutdruckmessung ist in ihrer Genauigkeit immer abhängig von der Profession des Messenden. ERKA unterstützt Sie hierbei mit einem besonders feinfühligem Ablassventil für eine unerreichte Sensitivität bei der Blutdruckmessung.

WARUM IST BLUTDRUCKMESSEN MIT ERKA BLUTDRUCKMESSGERÄTEN SO ANGENEHM?

Der ergonomische, extra flache Aufbau unserer Blutdruckmessgeräte kombiniert mit der gewichtsreduzierten Bauweise macht das Blutdruckmessen im medizinischen Alltag sehr komfortabel für den Nutzer. Alles wurde optimiert, damit Sie spielend mit einer Hand das Gerät und mit der anderen das Stethoskop bedienen können.

Erkameter 125	Größe	Bestellnummer
ERKA GreenCuff Superb Home Manschette, grau	Größe 4	410.40993.
ERKA GreenCuff Superb Home Manschette, grau	Größe 5	410.44993.
ERKA GreenCuff Superb Home Manschette, grau	Größe 3	410.46993.

Zubehör	Größe	Bestellnummer
Manschette: Green Cuff Superb Home, grau	5	025.44993
Manschette: Green Cuff Superb Home, grau	4	025.40993
Manschette: Green Cuff Superb Home, grau	3	025.46993

Ersatzteile

Impressum und Datenschutz

ERKA.
Kallmeyer Medizintechnik GmbH & Co. KG
Im Farchet 15
83646 Bad Tölz

Geschäftsführer: Björn Kallmeyer

HRA 75980, Amtsgericht München
Umsatzsteuer-ID: DE 812 833 893

Kontakt:
Telefon: 0 80 41 / 80 09-0
Telefax: 0 80 41 / 80 09-39
eMail: made@erka.org
<http://www.erka.org>

Verantwortlich:
Björn Kallmeyer

Signatur / Stempel

WARUM IST BLUTDRUCKMESSEN MIT ERKA BLUTDRUCKMESSGERÄTEN SO
ANGENEHM?